

Grid

3

Upute za korištenje

Smartbox

# Smartbox

Za podršku, video upute, internetske seminare  
i ostale informacije posjetite  
[www.thinksmartbox.com](http://www.thinksmartbox.com)

Dobrodošli u



Grid 3 omogućuje vam komunikaciju, učenje i upravljanje svojim svijetom.

Ova će vam knjižica pomoći podešiti Grid 3 kako biste odmah mogli početi komunicirati pomoću komunikacijskih mapa. Nakon što ste sve postavili i pokrenuli, ne zaboravite pogledati i Grid 3 kartice za učenje i video upute pomoću kojih ćete naučiti kako upotrebljavati program.



# Kreiranje korisnika

Kreiranje novog korisnika prva je stvar koju ćete napraviti u programu Grid 3. Nakon što kreirate korisnika, moći ćete prilagoditi postavke, setove komunikacijskih mapa, metode pristupa, govor i još puno toga.


Prilikom prvog pokretanja programa od vas će se zatražiti da kreirate korisnički profil:



Unesite korisničko ime te odaberite jezik i glas. Ako želite, također možete dodati sliku

## ★ Savjet

Ako želite napraviti sliku uz pomoć svoje web kamere, odaberite opciju „Kamera“ („Camera“) u izborniku „Promijeni sliku“ („Change Picture“).

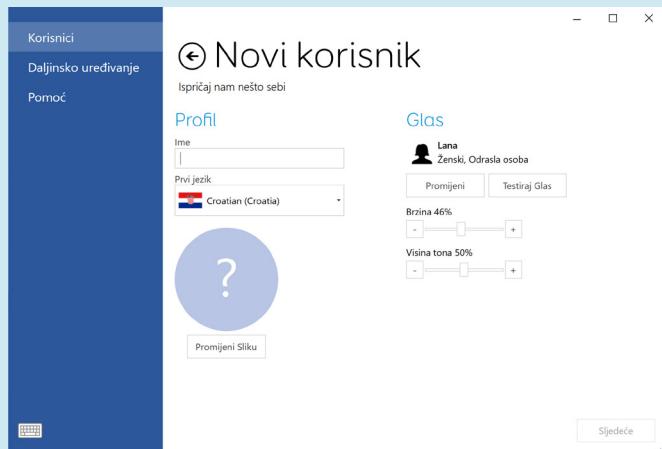

Od šest ponuđenih opcija, odaberite vrstu seta komunikacijskih mapa koji je potreban korisniku.

Ne brinite ako u ovom trenutku niste sigurni koji odabratiti – setove komunikacijskih mapa možete naknadno dodavati ili uklanjati.

Grid 3 posjeduje moćne alate za predikciju koji mogu značajno ubrzati komunikaciju.

Kako biste mogli iskoristiti ove značajke, morat ćete Gridu 3 dopustiti učenje iz vaših riječi, izraza i lokacije. Navedene postavke uvijek možete promjeniti.

Odaberite „Kreiraj korisnika“ („Create User“) da biste završili.

## ★ Savjet

Korisnik također može privremeno onemogućiti prikupljanje informacija o svojim aktivnostima pomoću funkcije privatnog načina rada.



# Grid sets

S programom Grid 3 dolazi cijeli niz korisnih setova komunikacijskih mapa koji se mogu koristiti odmah ili mogu poslužiti kao početna točka za daljnju personalizaciju.

## Komunikacija simbolima

**Symbol Talker A** predviđen je za osobe koje tek počinju s korištenjem alternativne komunikacije. Riječi su organizirane prema temama. Na komunikacijskoj mapi za pojedinu temu možete sastavljati jednostavne rečenice pomoću jedne ili dvije odabrane stavke.

**Symbol Talker B** nastavlja na temeljima usvojenih jezičnih vještina i vještina pristupa te nudi vokabular koji je potreban za sastavljanje rečenica od najviše tri stavke.

**Symbol Talker C** služi kao prijelazni alat za osobe koje su već naučile uspješno komunicirati pomoću vokabulara temeljenog na temama te koje su sada spremne upotrebljavati dodatne jezične alate kako bi mogle reći više toga. Sržni rječnik je naziv za skup riječi koje najčešće upotrebljavamo. Symbol Talker C omogućava pristup sržnom rječniku sa svake tematske komunikacijske mape, što vam daje mogućnost sastavljanja puno većeg broja različitih rečenica.

**Symbol Talker D** ističe sržni rječnik na početnoj stranici. To znači da nove rečenice možete stvarati jako brzo, a posjet tematskim stranicama potreban je samo ako želite potražiti manje učestale riječi. Pametni gramatički alati u Gridu 3 pomažu vam da automatski generirate gramatički ispravne rečenice, uz manje odabranih stavki.

## Symbol Talker A



## Symbol Talker C



## Symbol Talker B



Symbol Talker D





# Grid sets

## Komunikacija uz pomoć teksta

Fast Talker 3 set je komunikacijskih mapa za pismene korisnike. Na početnoj stranici možete odabrati želite li čavrljati ili otvoriti jednu od pristupačnih aplikacija, uključujući SMS, telefon, električku poštu, društvene mreže, aplikaciju za slušanje glazbe i još puno toga.

Fast Talker 3 koristi se moćnim alatima Grida 3 za predikciju i bilježenje povijesti razgovora kako bi značajno ubrzao generiranje poruka.

Text Talker je komunikacijski sustav temeljen na tekstu te je namijenjen pismenim korisnicima. Opremljen je alatima za predikciju i zbirkom gotovih poruka.

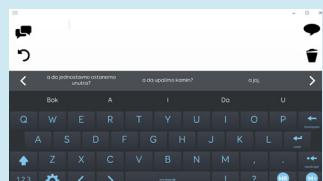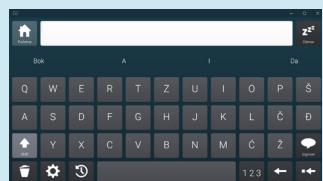


## Interaktivno učenje

Interaktivno učenje (Interactive Learning) potpuno je nov način za učenje i istraživanje. Svaka je aktivnost zamišljena kako bi omogućila učenje kroz igru i napredovanje u području alternativne komunikacije. Pritom je svaka motivacijska aktivnost popraćena komunikacijskim mapama koje vam omogućavaju da pričate o onome što ste postigli. Odaberite neku od čak 25 aktivnosti, podijeljenih u četiri ključna područja učenja.

Aktivnosti „Cause and effect“ („Uzrok i posljedica“) uključuju druženje s psom Dilbertom, sviranje čarobnog klavira i izradu vlastitog vatrometa.



„Choices“ („Izbor“) vam omogućuje da u izboru aktivnosti budete kreativni – od preuzimanja uloge modnog dizajnera i šetnje modnom pistom do pripreme fantastične torte i sastavljanja novog sportskog automobila.

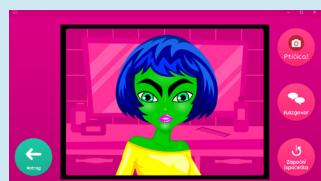

„Challenges“ („Izazovi“) su osmišljeni tako da se oslanjaju na vještine naučene u drugim kategorijama. Možete voziti automobilske trke, igrati društvenu igru slaganja četiriju žetona u nizu ili krenuti u avanturu prepunu akcije s Robo-pužem!




Interaktivni „Vizualni prizori“ („Visual scenes“) donose dinamičan i poticajan sadržaj koji pomaže u učenju jezika, čitanja i pisanja.



# Grid sets

Pristupačne aplikacije

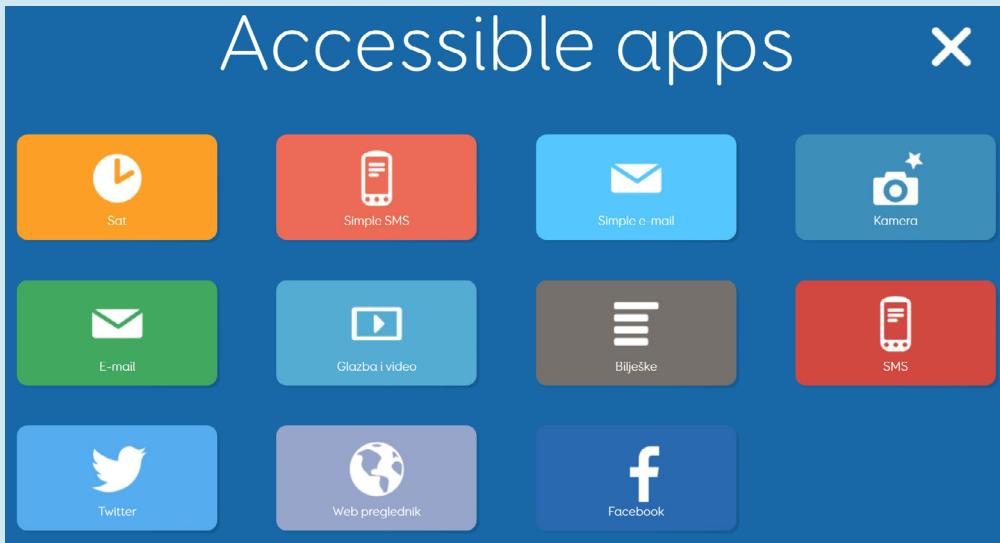

Grid 3 dolazi s već gotovim setovima komunikacijskih mapa za glazbu, fotografiranje, SMS-ove, pretraživanje interneta, društvene mreže, elektroničku poštu, telefoniranje, obradu teksta i još puno toga!

## Društvene mreže i internet

Objavljujte, dijelite i pretražujte profile na društvenim mrežama uz pomoć setova komunikacijskih mapa za Twitter i Facebook. Dijelite nove objave i tweetove brzo i jednostavno.



Integrirani internetski preglednik omogućuje intuitivan pristup internetskim stranicama i opremljen je najnovijim internetskim tehnologijama. Polja sa svim poveznicama na pojedinoj internetskoj stranici mogu se generirati automatski.

## Komunikacija na daljinu

Prebacite se na mobilni uređaj pomoću ugrađenih funkcija za upravljanje pametnim telefonom i SMS-porukama. Poruke se također mogu izraziti simbolima kako bi se ubrzalo prepoznavanje i čitanje. Šaljite i primajte elektroničku poštu kako biste ostali u kontaktu s prijateljima i obitelji. Jednostavno pretražujte pristiglu poštu te sastavljajte i šaljite poruke.



## Glazba, fotografije i video zapis


Jednostavno upravljajte medijskim sadržajima uz pomoć setova komunikacijskih mapa za fotografije, glazbu i video.



Pretraživanje glazbe prema albumu, izvođaču ili nazivu pjesme lako je i omogućava vam pronalaženje savršene glazbene podloge. Video zapis i lako se kategoriziraju i gledaju. Uz pomoć Integrirane YouTube aplikacije pretraživanje video zapisa je jednostavno i lako.



Setovi komunikacijskih mapa za kameru i fotoalbum omogućavaju vam slikanje i dijeljenje najboljih fotografija s drugima.

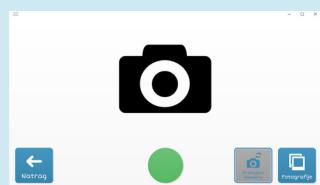


### Savjet

S lakoćom možete dodati komunikacijske mape za pristupačne aplikacije u postojeći set komunikacijskih mapa. U načinu rada za uređivanje odaberite polje „Set komunikacijskih mapa“ („Grid Set“), a zatim opciju „Dodaj“ („Add“) iz drugog seta komunikacijskih mapa.

# Grid sets


## Sustav za upravljanje okolinom Servus environment control

Funkcije programa Grid 3 za upravljanje okolinom omogućuju vam da pomoći svog računala upravljate svime, od svjetala do ulaznih vrata. Ovime su obuhvaćeni svi predmeti kojima se upravlja pomoći infracrvenog daljinskog upravljača, npr. televizor, satelitski prijemnik i glazbena linija.

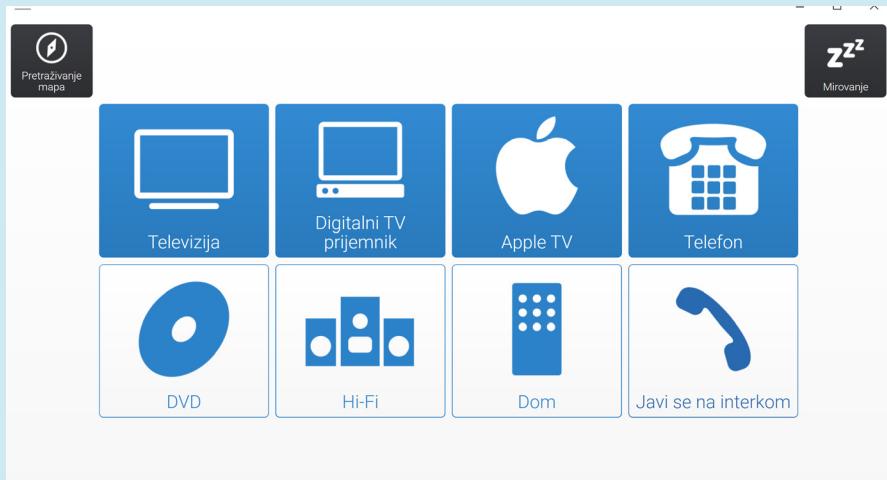

Uključena su dva seta komunikacijskih mapa – jedan sa svim značajkama i druga, jednostavnija verzija za one koji se tek uče upravljanju okolinom.


Jednostavan i pregledan dizajn setova komunikacijskih mapa sustava Servus čini navigaciju i odabir funkcija lakin i intuitivnim.

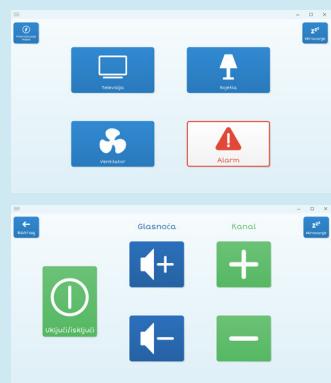

# Upravljanje računalom

Funkcija za upravljanje računalom preko programa Grid 3 na raspolaganje vam stavlja sve potrebne alate za pristup računalu pomoću pogleda, pokazivača ili sklopki. Možete se poslužiti setovima komunikacijskih mapa za upravljanje bilo kojom aplikacijom koja vam je potrebna u kućanstvu, u školi ili na poslu.

Dostupne su dvije vrste setova komunikacijskih mapa za upravljanje računalom – jedna za upravljanje pokazivačem (optimizirana za upravljanje okom ili naglavnim mišem) i jedna za upravljanje preko sklopki

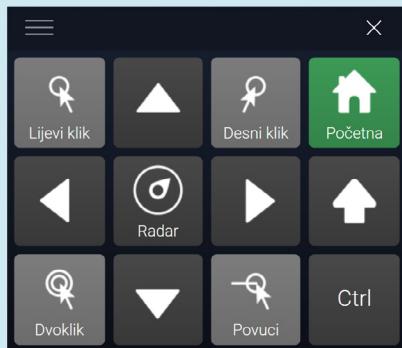


Korisnici pokazivača mogu odabratи jedno od polja za klik, a zatim pogledati u bilo koji dio zaslona kako bi ga uvećali i kliknuli s maksimalnom preciznošću. Korisnici sklopki mogu se poslužiti nizom naredbi kako bi imali kontrolu nad svim aspektima bilo kojeg programa.

Za unos teksta u bilo kojem Windows programu, uključujući internetske preglednike, Microsoft Office i ostale, dostupna je zaslonska tipkovnica.

## Savjet


Obavezno posjetite Online Grids kako biste pronašli još mnogo gotovih materijala.

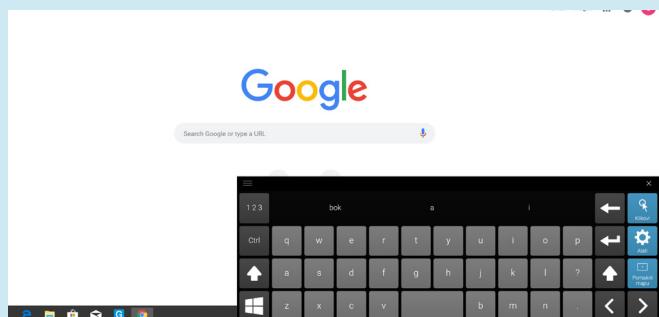

# Grid Explorer

Grid Explorer vaša je upravljačka ploča preko koje možete učitavati različite setove komunikacijskih mapa i upravljati njima. U potpunosti je pristupačna te se možete koristiti metodom pristupa koju ste odabrali u postavkama za pojedinog korisnika.

Odaberite traku „Izbornik („Menu“) na vrhu Grid Explorera kako biste pregledali različite opcije.

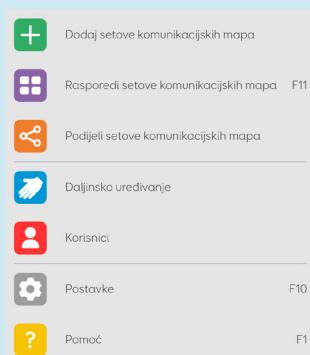

## Organiziranje setova komunikacijskih mapa

Možete promijeniti poretku prema kojem se prikazuju vaši setovi komunikacijskih mapa tako što ćete u izborniku odabrati „Organiziraj setove komunikacijskih mapa“ („Arrange Grid Sets“).




Vucite svoje setove po zaslonu kako biste ih presložili ili napravite posebne mape u koje ćete ih pospremiti. Ako imate više od jedne stranice setova komunikacijskih mapa, možete ih prelistavati klikanjem na strelice sa strane. Kada završite s preslagivanjem setova, odaberite „Završi s organiziranjem“ („Finish Arranging“).

## Dodavanje setova komunikacijskih mapa


Nove setove komunikacijskih mapa možete s lakoćom dodati u Grid Explorer tako što ćete u izborniku odabrati „Dodaj set komunikacijskih mapa“ (Add Grid Set). Postojeće komunikacijske mape organizirane su prema području.

Možete izraditi i novi prazan set ili pretražiti setove komunikacijskih mapa koje su sa zajednicom podijelili drugi korisnici Grida 3.

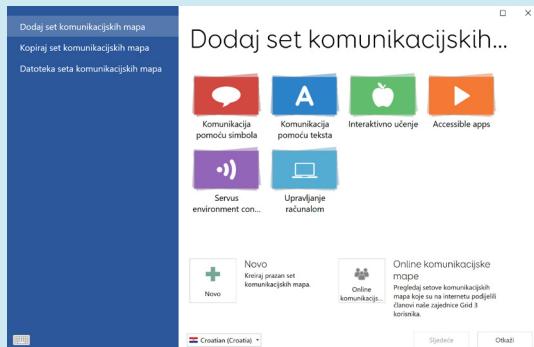

## Postavke

Odaberite traku „Izbornik“ („Menu“), a zatim „Postavke“ („Settings“). Ovdje možete pretraživati i mijenjati postavke za trenutnog korisnika, uključujući postavke pristupa, govora i upravljanja okolinom (više informacija pronaći ćete u karticama za obuku u lekciji 3).

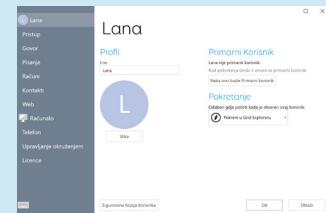

## Savjet

Ove će se postavke primjenjivati u svim setovima komunikacijskih mapa koje otvara trenutni korisnik. To znači da ćete postavke morati prilagoditi samo jednom, nakon čega ćete ih moći koristiti u bilo kojem broju setova komunikacijskih mapa.

# Grid Explorer

## Korisnici

Možete mijenjati korisnike ili dodavati nove korisnike tako što ćete odabrati opciju „Korisnici“ („Users“) u izborniku Grid Explorer-a.

Korisnika za kojeg postoji rezervna kopija možete vratiti odabirom opcije „Vrati rezervnu kopiju“ („Restore Backup“).

Korisnici

Daljinsko uređivanje

Pomoć

Primarni korisnik

Korisnici

L Lucy

Lana

Luna

Smartbox  
Message Banking  
2019-31-01

Novo Obrisi Vrati sigurnosnu kopiju Otvori

## Uređivanje na daljinu


Uređivanje na daljinu omogućava drugom korisniku Grida 3 da pristupi vašim setovima komunikacijskih mapa i uređuje ih preko interneta. Možete se prijaviti za uređivanje mapa drugog korisnika odabirom opcije „Uređivanje na daljinu“ („Remote Editing“) u izborniku. Za više informacija proučite lekciju 2.8.



# Upotreba seta komunikacijskih mapa

Upotreba seta komunikacijskih mapa jednostavna je i intuitivna. Premda će se svaki set komunikacijskih mapa malo razlikovati, ovom ćemo se stranicom iz Symbol Talkera A poslužiti kako bismo vam pokazali osnove.

Veliko polje na vrhu je prostor za pisanje.  
Ovdje se sastavlja poruka.  
Klik na ovo polje pomaknut će cursor ili izgovoriti poruku, ovisno o vašim postavkama.

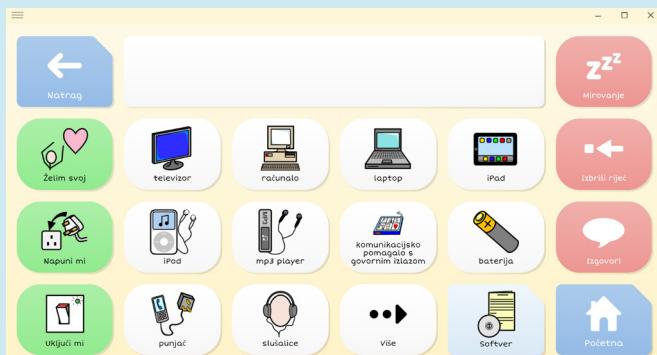

Zelena polja označavaju početne dijelove rečenice. Bijela polja su polja iz popisa riječi. I zelena i bijela polja šalju tekst u prostor za pisanje kako bi se mogla sastaviti poruka. U ovom je slučaju dostupno više vokabulara nego što stane na stranicu – odaberite „Više“ („More“) kako biste pristupili većem broju riječi.

Crvena polja su polja s naredbama koja izvršavaju posebne funkcije. Polje s natpisom Pauza u kutu služi pauziranju unosa za korisnike koji upravljaju pogledom ili naglavnim mišem – ponovno ga odaberite kako biste nastavili unos. Polja za skakanje služe navigaciji između različitih mapa u setu komunikacijskih mapa. U ovom se slučaju možete vratiti na početnu mapu tako što ćete odabrati polje „Početna“, ili se prebaciti na mapu Softver.

## Savjet

Ako želite brzo pronaći mapu u kojoj se nalazi određena riječ, odaberite traku izbornika i zatim „Pronađi riječ“.

# Brzo uređivanje

Manje izmjene polja ili mape mogu se napraviti brzo i lako. Ovdje ćemo vam pokazati kako napraviti manje izmjene na polju ili kako brzo dodati riječ u mapu.

## Promjena oznake ili slike

Odaberite traku izbornika, a zatim „Uređivanje“ („Edit“) (ili pritisnite F11 na tipkovnici). Polje koje želite urediti odaberite klikom na nj.




Sada možete promijeniti tekst koji se pojavljuje na polju tako što ćete odabratи „Promijeni oznaku“ („Change Label“). Također možete odabratи drugu sliku. Po završetku odaberite „Završi uređivanje“ („Finish Editing“) i spremite izmjene.

Više informacija o uređivanju polja pronaći ćete u lekcijama 1.1 i 1.2.

## Dodavanje na popis riječi

Ako vaš set komunikacijskih mapa koristi popise riječi, riječi možete s lakoćom dodati klikom na traku izbornika, a zatim na „Popis riječi“ („Word list“). Nakon toga kliknite „Dodaj“ („Add“), upišite novu riječ, odaberite sliku i kliknite na „OK“. Za više informacija o popisima riječi proučite lekciju 2.1.

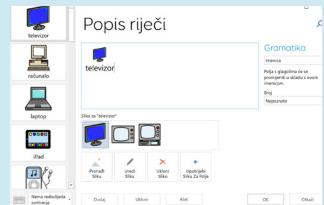

## ★ Savjet

Zaslonsku tipkovnicu možete prikazati klikom na ikonu u donjem lijevom kutu.

# Automatsko pokretanje pri pokretanju računala



Možda želite podesiti Grid 3 tako da se pokreće automatski kada upalite računalo. U izborniku „Postavke“ („Settings“) odaberite „Računalo“ („Computer“), a zatim „Pokreni Grid 3 s Windowsima“ („Launch Grid 3 with Windows“).




## Savjet

Ovdje također možete podesiti Grid 3 tako da se povezuje s vašom kamerom i printerom.

## Postavljanje početnog seta komunikacijskih mapa

Da biste odabrali koji se set komunikacijskih mapa otvara pri pokretanju programa Grid 3, provjerite je li odabran primarni korisnik te odaberite traku izbornika pri vrhu zaslona, a zatim „Postavke“ („Settings“). U izborniku „Pokretanje“ („Startup“) na vrhu stranice kliknite na padajući izbornik i odaberite neki od dostupnih setova komunikacijskih mapa ili Grid Explorer.

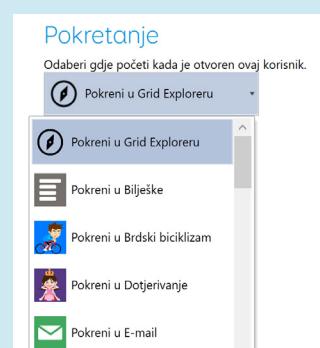

Svoju avanturu s programom Grid 3 nastavite na  
[thinksmartbox.com](http://thinksmartbox.com)

Smartbox