

Begynd her

Indstilling to Opsætning

Kom godt i gang med din Talk Pad

1

Opstart af din Talk Pad

2

Apple-opsætning

3

Opret dit Apple-id

4

Download Grid for iPad

5

Aktivér Grid for iPad

6

Opsæt Grid for iPad

7

Link til at downloade Smartbox

Denne Talk Pad kan **opsættes på egen hånd**.

Du får brug for

- Din Talk Pad
- Trådløs internetforbindelse
- En e-mailadresse
- Din licens til Grid for iPad
- En mobil- eller fastnettelefon

Valgfrit

- En stikkontakt til opladning af din Talk Pad (det er bedst at oplade enheden, mens du opsætter den!)
- En Dropbox-konto

I denne vejledning viser vi dig først de grundlæggende iPad-indstillinger, og derefter hvordan du anvender din Grid for iPad-licens.

I denne vejledning antager vi, at det er den første Apple-enhed, du opsætter. Hvis du har brugt en iPad før, kan du genkende noget af følgende.

1

Opstart af din Talk Pad

Trin 1

Sæt din Talk Pad (og højttaleren) i en stikkontakt, så den kan oplade.

Trin 2

Tænd for din Talk Pad med tænd/sluk-knappen på enhedens venstre side.

Apple-opsætning

2

Trin 1

Nu skal du igennem opsætning af din iPad. Det drejer sig hovedsagligt om de følgende skærminstruktioner.

Trin 2

Du bliver måske spurgt, om du ønsker Hurtigstart. Hvis du allerede har en Apple-konto og tidligere har opsat en iPad eller iPhone, kan du logge ind og overføre dine oplysninger.

Ellers skal du vælge:

[Opsæt manuelt](#)

Trin 3

Opret forbindelse til et trådløs netværk. Vælg dit netværk på listen, og indtast adgangskoden.

Herefter aktiveres iPad'en.

Trin 4

Du bliver muligvis bedt om at opsætte Touch-id. Derved kan du oplåse din enhed med et fingeraftryk. Bemærk, at din Talk Pad dækker for sensoren til Touch-id.

Du kan vælge at gøre det, eller vælge:

[Opsæt Touch-id senere](#)

Trin 5

Nu skal du vælge en adgangskode til din enhed.

Den kommer du til at bruge til at oplåse din enhed og få adgang til følsomme indstillinger. Sørg for at bruge en 6-cifret adgangskode, du altid kan huske!

Trin 6

Du bliver muligvis spurgt, om du vil overføre apps og data fra en anden enhed.

Du kan skippe dette trin ved at vælge:

[Overfør ikke apps og data](#)

Opret dit Apple-id

3

Trin 1

Hvis du allerede har et Apple-id, indtaster du din e-mailadresse og trykker på [Næste](#).

Har du ikke et Apple-id, skal du oprette et.

Vælg:

[Glem adgangskode eller har ikke Apple-id?](#)

Du får tre valgmuligheder, vælg:

[Opret et gratis Apple-id](#)

Bemærk, at du kan skippe dette trin ved at vælge [Opsæt senere under Indstillinger](#), men uden et Apple-id vil du ikke kunne downloade Grid for iPad!

Trin 2

Indtast dine oplysninger.

Indtast fornavn, efternavn og fødselsdato, og tryk derefter på [Næste](#).

Indtast din e-mailadresse. Notér dig, hvilken e-mailadresse, du har angivet, da du skal bruge den senere til at logge ind på dit Apple-id.

Trin 3

Vælg en sikker adgangskode til dit Apple-id. Du kan notere den, hvis det er nødvendigt, men gem den sikkert!

Trin 4

Derefter skal du verificere din konto. Til det skal du bruge din telefon, så hav den ved hånden.

Indtast dit telefonnummer og vælg, om du ønsker at verificere med [SMS](#) eller [telefonopkald](#).

Du modtager derefter en 6-cifret verificeringskode. Indtast den for at verificere din konto.

Trin 5

Til sidst får du nogle valgmuligheder i forhold til tjenester som Placering, iCloud, Siri, skærmtid og analyse.

Dette er ikke nødvendigt for at bruge Talk Pad som kommunikationsenhed, men du ønsker måske alligevel at aktivere dem. Du kan også aktivere eller deaktivere dem senere, i appen med [Indstillinger](#).

Når du ser ordene [Ny bruger](#), betyder det, at opsætningen er fuldført!

Download Grid for iPad

4

Trin 1

Hvis du lige har opsat dit Apple-id, skal du færdiggøre opsætningen ved at gå til appen [Indstillinger](#) og følge instruktionerne for at bekræfte din e-mail.

Når du har bekræftet din e-mail, kan du downloade Grid for iPad i App Store.

Trin 2



Brug kameraet til at scanne QR-koden ovenfor, eller søg på Grid for iPad - AAC, i App Store.

5

Aktivér Grid for iPad

Trin 1

På din iPad, telefon eller computer går du ind på grids.thinksmartbox.com

Du kan oprette en Smartbox-konto og aktivere Grid for iPad på vores websted med Online Grid Layouts.

Hvis du ikke har en Smartbox-konto, så tryk på [Tilmeld](#) i menuen foroven, og indtast dine oplysninger, eller tryk på Log ind.

Trin 2

Derefter skal du bruge din [Grid for iPad-licens](#) til din Smartbox-konto.

Tryk på [Mine licenser](#).



Indtast din Grid for iPad-licenskode, og vælg [Aktivér](#).

Når din Grid for iPad-licens er aktiveret, er den knyttet til din Smartbox-konto.

Du kan tjekke dette på siden [Mine enheder](#) i Online Grid Layouts.

Når du logger ind på Grid for iPad i næste trin, vil du kunne se din iPad her.


6

Opsæt Grid for iPad

Trin 1

Når Grid for iPad er downloadet og installeret på din enhed, kan du trykke på ikonet på din Hjem-skærm for at åbne appen.


På Grid for iPad-startskærmen, tryk på [Log ind](#).

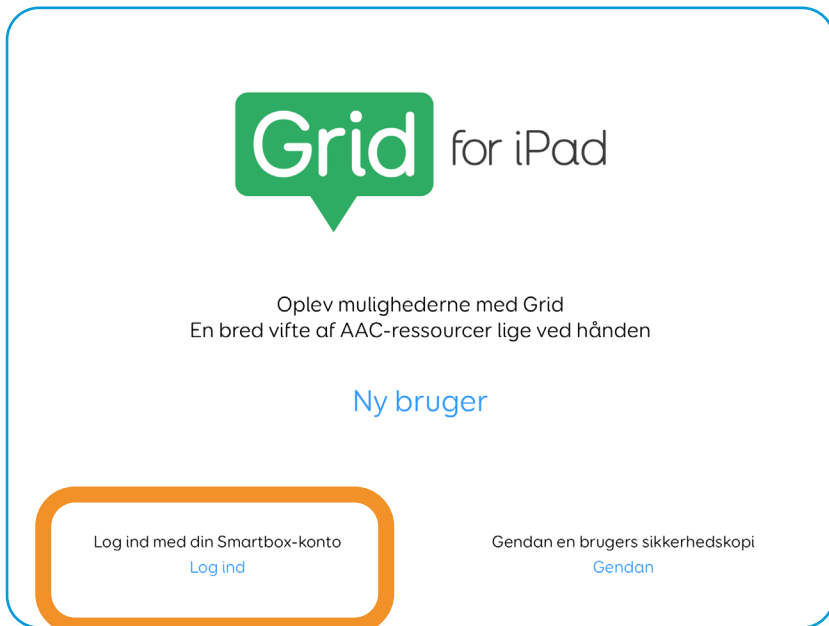

Trin 2

Indtast din e-mailadresse og adgangskode, og vælg Log ind.

Således aktiveres Grid for iPad, og du kan fortsætte med at opsætte din brugerprofil og dit Grid Layout.

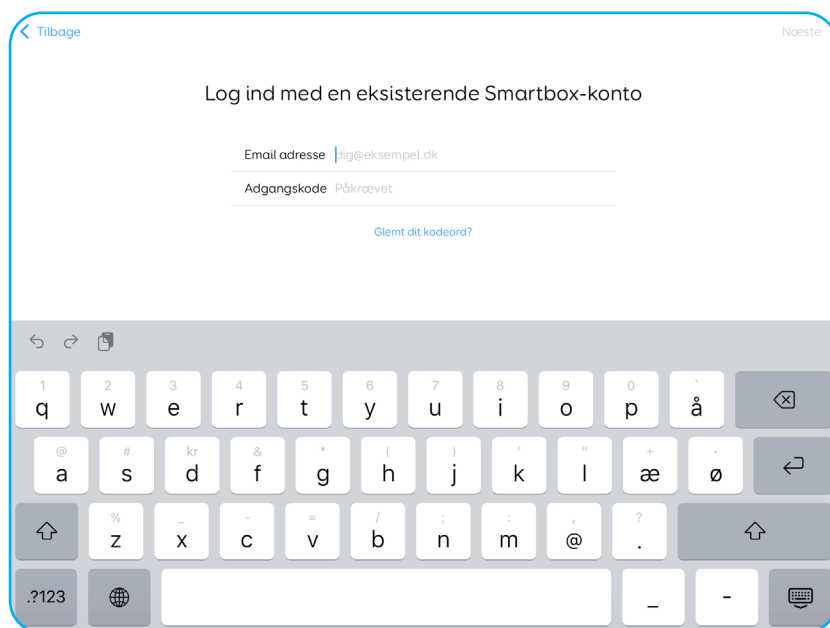

7

Download Smartbox Link

Smartbox Link-appen er din portal til support, dokumentation og firmwareopdateringer til din enhed.



hub.thinksmartbox.com/smartbox-link

Brug kameraet til at scanne QR-koden ovenfor, eller søg på Smartbox Link i App Store.



Har du brug for hjælp til at
starte?

Få support
hub.thinksmartbox.com