

Inizia qui

Configurazione da parte dell'utente

Primi passi con il tuo Talk Pad

1

Accendere Talk Pad

2

Configurazione Apple

3

Creazione di un Apple ID

4

Download di Grid for iPad

5

Attivazione di Grid for iPad

6

Configurazione di Grid for iPad

7

Download di Smartbox Link

Questo Talk Pad deve essere **configurato direttamente dall'utente**.

Elementi necessari per la configurazione

- Il tuo Talk Pad 8
- Una connessione internet Wi-Fi
- Un indirizzo email
- La tua licenza Grid for iPad
- Uno smartphone o linea telefonica fissa

Elementi facoltativi

- Una presa di corrente per ricaricare il Talk Pad (è consigliabile caricare il dispositivo durante la configurazione!)
- Un account Dropbox

Questa guida illustra innanzitutto il processo di configurazione di base con iPad; dopodiché, ti spiegheremo come attivare la tua licenza Grid for iPad.

La guida parte dal presupposto che tu stia eseguendo la configurazione per la prima volta su un dispositivo Apple. Se sai già utilizzare un iPad, potresti avere familiarità con alcuni dei passaggi illustrati di seguito.

1

Accendere Talk Pad

Passo 1

Collega Talk Pad (compreso l'altoparlante) a una presa di corrente per caricare la batteria.

Passo 2

Accendi Talk Pad utilizzando l'apposito pulsante sul lato sinistro del dispositivo.

Configurazione Apple

2

Passo 1

A questo punto potrai procedere con la configurazione dell'iPad seguendo le istruzioni visualizzate sulla schermata.

Passo 2

Potrebbe esserti chiesto se desideri usare Inizia subito. Se hai già un account Apple e hai precedentemente completato la configurazione di un iPad o iPhone, avrai la possibilità di configurare automaticamente il dispositivo con i tuoi dati.

In caso contrario, seleziona:

[Configura manualmente](#)

Passo 3

Esegui la connessione a una rete Wi-Fi. Seleziona la tua rete dall'elenco e digita la password.

L'iPad completerà automaticamente l'attivazione.

Passo 4

Potrebbe esserti chiesto di configurare il Touch ID, che ti permette di sbloccare il dispositivo con l'impronta digitale. Ricorda che il Talk Pad copre il sensore Touch ID.

Puoi decidere se procedere con la configurazione o selezionare:

[Configura Touch ID in seguito](#)

Passo 5

Il passo successivo prevede la configurazione di un codice

che ti servirà per sbloccare il dispositivo e accedere a impostazioni sensibili. Assicurati di selezionare un codice da sei cifre facile da ricordare!

Passo 6

Potrebbe esserti chiesto di trasferire app e dati da un altro dispositivo.

Puoi saltare questo passaggio selezionando:

[Non trasferire app e dati](#)

Creazione di un Apple ID

3

Passo 1

Se hai già un Apple ID, inserisci il tuo indirizzo email e seleziona [Avanti](#).

In caso contrario, sarà necessario crearne uno.

Seleziona:

[Hai dimenticato la password o non hai un ID Apple?](#)

Saranno quindi visualizzate tre opzioni; seleziona:

[Crea un ID Apple gratuito](#)

Puoi saltare questo passaggio scegliendo [Configura dopo nelle Impostazioni](#), ma ricorda che senza un Apple ID non sarai in grado di scaricare Grid for iPad!

Passo 2

Inserisci i tuoi dettagli.

Digita nome, cognome e data di nascita, quindi seleziona [Avanti](#).

Inserisci il tuo indirizzo di posta elettronica. Prendi nota dell'indirizzo email utilizzato, poiché ti servirà per accedere al tuo Apple ID.

Passo 3

Scegli una password sicura per il tuo Apple ID. Puoi prendere nota della password selezionata, se lo desideri, ma ricorda che dovrai tenerla al sicuro!

Passo 4

A questo punto dovrai procedere con la verifica dell'account. Per completare questa operazione ti servirà lo smartphone, quindi tienilo a portata di mano.

Inserisci il numero di telefono e scegli se preferisci completare la verifica tramite [SMS](#) o [Telefonata](#).

Riceverai un codice da sei cifre. Inseriscilo per completare la verifica dell'account.

Passo 5

Infine, saranno visualizzate alcune opzioni relative a servizi come Posizione, iCloud, Tempo di utilizzo e Analisi.

Queste opzioni non sono obbligatorie per l'utilizzo di Talk Pad come dispositivo di comunicazione, quindi puoi decidere se abilitarle o meno. Puoi anche decidere se attivarle in un momento successivo dall'app [Impostazioni](#).

Quando visualizzi il messaggio [Iniziamo](#) significa che la configurazione è stata completata con successo!

Download di Grid for iPad

4

Passo 1

Se hai appena configurato il tuo Apple ID, dovrai completare la configurazione aprendo l'app [Impostazioni](#) e seguendo le istruzioni visualizzate per la conferma dell'indirizzo email.

Una volta confermato, sarai in grado di utilizzare l'App Store per scaricare Grid for iPad.

Passo 2



Usa la fotocamera per eseguire la scansione del codice QR o per cercare Grid for iPad - AAC nell'App Store.

5

Attivazione di Grid for iPad

Passo 1

Dal tuo iPad, smartphone o computer, visita la pagina grids.thinksmartbox.com


Da qui puoi creare un account Smartbox e attivare Grid for iPad sul nostro sito Griglie Online.

Se non hai un account Smartbox, seleziona [Registrati](#) dal menu in alto e inserisci i tuoi dati; altrimenti, tocca [Accedi](#).

Passo 2

A questo punto dovrai assegnare la [licenza Grid for iPad](#) al tuo account Smartbox.

Seleziona [Le mie licenze](#).

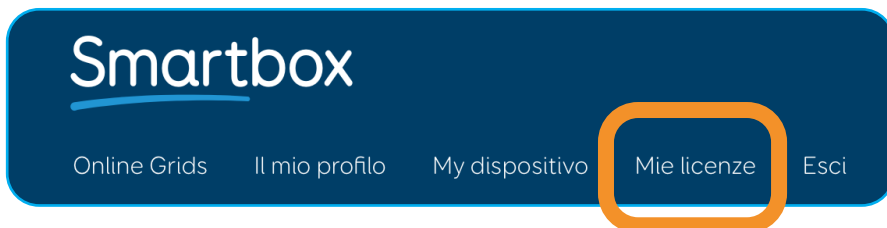

Inserisci il codice della licenza Grid for iPad e seleziona [Attiva](#).

Una volta attivata, la licenza Grid for iPad sarà associata al tuo account Smartbox.

Puoi controllare lo stato di attivazione alla sezione [I miei dispositivi](#) di Griglie Online.

Eseguendo l'accesso a Grid for iPad nel passo successivo, verrà visualizzato il tuo iPad.

6

Configurazione di Grid for iPad

Passo 1

Una volta completati il download e l'installazione di Grid for iPad sul dispositivo, potrai selezionare l'apposita icona sulla schermata Home per aprire l'app.

Seleziona [Accedi](#) dalla schermata iniziale di Grid for iPad.



Passo 2

Inserisci il tuo indirizzo email e la password e seleziona Accedi.

Eseguire l'accesso conferma l'attivazione di Grid for iPad e potrai continuare con la configurazione dell'utente e delle attività.

Indietro Il prossimo

Accedi con un account Smartbox esistente

Indirizzo Email

Password

[Hai dimenticato la password?](#)

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

z x c v b n m @ .

.?123

7

Download di Smartbox Link

L'app Smartbox Link permette di accedere a risorse di assistenza, documentazione e aggiornamenti al firmware per il tuo dispositivo.



hub.thinksmartbox.com/smartbox-link

Usa la fotocamera per eseguire la scansione del codice QR o per cercare Smartbox Link nell'App Store.



Hai bisogno di aiuto per
iniziare?

Richiedi assistenza
hub.thinksmartbox.com.