

# Begynn her

Eget oppsett

## Komme i gang med Talk Pad

1

Slå på Talk Pad

2

Apple-oppsett

3

Opprette din Apple-ID

4

Laste ned Grid for iPad

5

Aktivere Grid for iPad

6

Sette opp Grid for iPad

7

Laste ned SmartBox Link

Denne Talk Pad-en er klar for **eget oppsett**.

### **Du vil trenge**

- Talk Pad
- Tilgjengelig Wi-Fi Internett-tilkobling
- E-postadresse
- Grid for iPad-lisens
- Mobiltelefon eller fasttelefonlinje

### **Valgfritt**

- Strømstøpsel for å lade Talk Pad-en (det er best å lade enheten mens du setter opp)
- Dropbox-konto

Denne veiledningen vil ta deg gjennom det grunnleggende iPad-oppsettet og deretter vise deg hvordan du løser inn Grid for iPad-lisensen.

I denne veiledningen antar vi at dette er den første Apple-enheten du har konfigurert. Hvis du har brukt e iPad før, kan noe av dette være kjent.

1

## Slå på Talk Pad

### Trinn 1

Koble Talk Pad (inkludert høyttaleren) inn i et strømstøpsel for å lade.

### Trinn 2

Slå på Talk Pad ved å trykke på av/på-knappen på venstre side av enheten.

# Apple-oppsett

2

## Trinn 1

Du vil nå gå gjennom iPad-oppsettet. Dette vil i hovedsak være å følge instruksjoner på skjermen.

## Trinn 2

Du kan bli spurt om du vil bruke hurtigstart. Hvis du allerede har en Apple-konto, og tidligere har satt opp en iPad eller iPhone, vil dette la deg logge inn og hente over opplysningene dine.

Ellers velger du følgende når du blir bedt om det:

[Sett opp manuelt](#)

## Trinn 3

Du må koble til et Wi-Fi nettverk. Velg nettverket ditt fra listen og skriv inn passordet.

iPad-en vil deretter aktiveres.

## Trinn 4

Du kan bli bedt om å sette opp Touch ID. Dette lar deg låse opp enheten med et fingeravtrykk. Merk at Talk Pad-en dekker Touch ID-sensoren.

Du kan velge å gjøre dette, eller velge:

[Sett opp Touch ID senere](#)

## Trinn 5

Du vil nå sette opp en passkode for enheten.

Du vil bruke denne til å låse opp enheten og få tilgang til sensitive innstillinger. Når du velger den 6-sifrede passkoden, må du sørge for at det er minneverdig slik at du husker den!

## Trinn 6

Du kan bli spurt om du vil overføre apper og data fra en annen enhet.

Du kan hoppe over dette trinnet ved å velge:

[Ikke overfør apper og data](#)

# Opprette din Apple-ID

3

## Trinn 1

Hvis du allerede har en Apple-ID, angi e-postadressen og trykk deretter på [Neste](#).

Hvis ikke må du opprette én.

Velg:

[Glemt passord eller har ikke en Apple-ID?](#)

Du vil deretter ha tre alternativer, velg:

[Opprett en gratis Apple-ID](#)

Merk at du kan hoppe over dette trinnet ved å velge [Sett opp senere i Innstillinger](#), men uten en Apple-ID vil du ikke kunne laste ned Grid for iPad.

## Trinn 2

Du må nå angi personopplysninger.

Angi fornavn, etternavn og fødselsdato og velg [Neste](#).

Angi deretter e-postadressen din. Merk deg hvilken e-postadresse du bruker, da denne vil bli brukt til å logge deg inn på din Apple-ID.

## Trinn 3

Velg et sikkert passord for din Apple-ID. Du kan notere dette ned om du vil, men vær oppmerksom på at du må holde passordet trygg!

## Trinn 4

Du må deretter verifisere kontoen din. Dette gjøres over telefonen, så ha en for hånden.

Angi telefonnummeret og velg om du vil ha verifisering via [tekstmelding](#) eller [telefonsamtale](#).

Du vil deretter motta en seks-sifret verifiseringsode. Angi denne for å verifisere kontoen din.

## Trinn 5

Til slutt vil du ha noen forskjellige alternativer rundt tjenester som Lokasjon, iCloud, Siri, Skjermtid og Analyse.

Disse er ikke nødvendige for å bruke Talk Pad-en som en kommunikasjonsenhet, men du vil kanskje ønske å aktivere dem. Du kan også veksle dem på eller av senere i [Innstillinger](#)-appen.

Når du ser meldingen [Kom i gang](#), er oppsettet fullført!



# Laste ned Grid for iPad

4

## Trinn 1

Hvis du nettopp har satt opp din Apple-ID, må du fullføre oppsettet ved å gå til [Innstillinger](#)-appen, og deretter følge instruksjonene for å bekrefte e-posten din.

Når denne er bekreftet, vil du kunne bruke App Store for å laste ned Grid for iPad.

## Trinn 2



Bruk kamera-appen for å skanne QR-koden ovenfor eller søk i App Store for Grid for iPad - AAC

# 5

## Aktiver Grid for iPad

### Trinn 1

På iPad-en din, telefonen eller datamaskinen, gå til [grids.thinksmartbox.com](https://grids.thinksmartbox.com)

Du kan opprette en Smartbox-konto og aktivere Grid for iPad på Online Grids-nettstedet.

Hvis du ikke har en Smartbox-konto, trykk på [Registrer deg](#) i toppmenyen og angi opplysningene dine, ellers kan du trykke på Logg inn.

### Trinn 2

Nå må du tilordne [Grid for iPad-lisens](#) til Smartbox-kontoen.

Trykk på [Mine lisenser](#).



Angi Grid for iPad-lisenskoden din og velg [Aktiver](#).

Når Grid for iPad-lisensen er aktivert, blir den koblet til Smartbox-konten din.

Du kan sjekke dette på [Mine enheter](#)-siden av Online Grids.

Når du logger inn på Grid for iPad i det neste trinnet, vil iPad-en vises her.


# 6

## Sette opp Grid for iPad

### Trinn 1

Når Grid for iPad har lastet ned og blitt installert på enheten din, kan du trykke på ikonet på startskjermen for å åpne appen.


Trykk på [Logg inn](#) fra Grid for iPad-startskjermen.

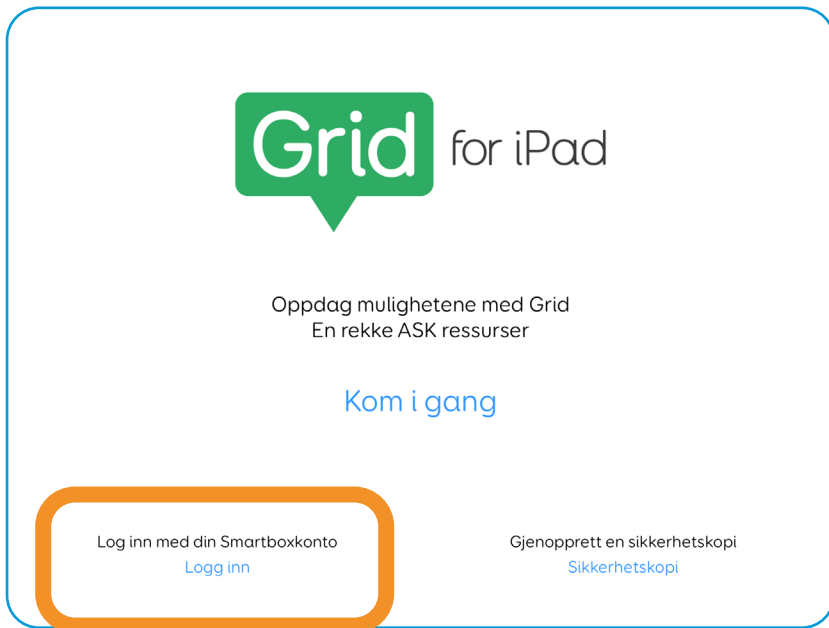

## Trinn 2

Angi e-post og passord og velg logg inn.

Dette vil aktivere Grid for iPad og du kan fortsette å sette opp din bruker og gridsettene.

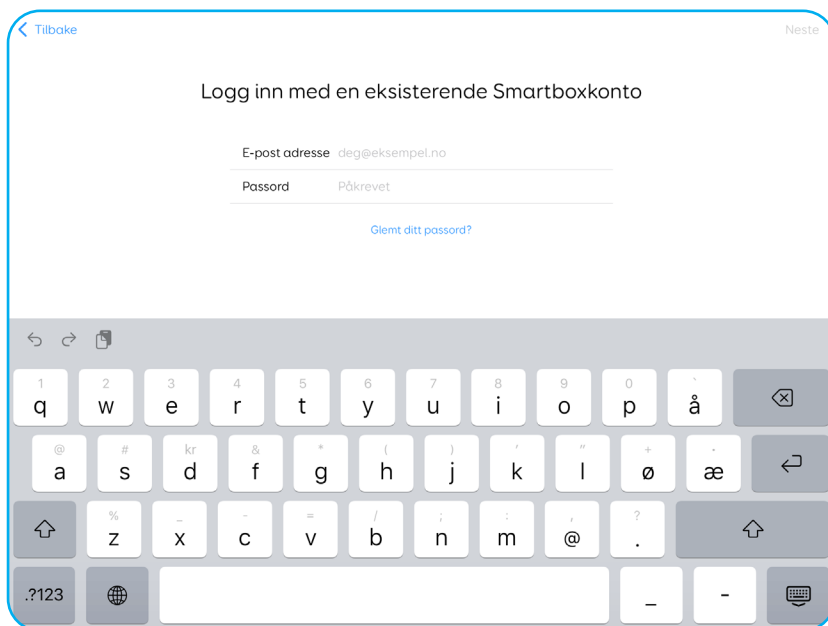

< Tilbake Neste

Logg inn med en eksisterende Smartboxkonto

E-post adresse

Passord

[Glemt ditt passord?](#)

↩ ↲ 📄

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ` å ✖

@ # kr & \* ( ) / " ' + . ↵

↩ % \_ - = / : ; ' ? ↵

.?123 🌐  - - 📄

7

## Laste ned Smartbox Link

Smartbox Link-appen er din portal for støtte, dokumentasjon og fastvareoppdateringer for enheten.



[hub.thinksmartbox.com/smartbox-link](https://hub.thinksmartbox.com/smartbox-link)

Bruk kamera-appen for å skanne QR-koden ovenfor eller søk i App Store for Grid for Smartbox Link.





Trenger du hjelp for å komme i gang?

Få støtte  
[hub.thinksmartbox.com](http://hub.thinksmartbox.com)

Talk Pad - Start here - Self setup - NO - A