

Talk Pad


Montage-Adapter

Dieses Montage-Adapter Set enthält:

- Montage-Adapter (10096-03 oder 10096-04)
- Schrauben x 3
- Inbusschlüssel



Suchen Sie die drei Montage-Schraubenlöcher auf der Hinterseite Ihres Geräts.

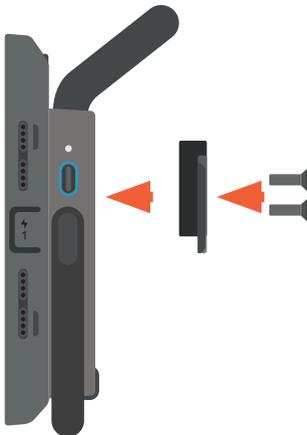

Befestigen Sie den Montage-Adapter wie abgebildet. Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest.

Wenn Sie den Adapter gut befestigt haben, folgen Sie den Anweisungen, die Ihrem Montagesystem beilegen, um Ihr Gerät zu befestigen.

Zeichenerklärung

Zeichen	Bedeutung
	Europäisches Konformitätszeichen zur Erklärung der Konformität mit dem EU-Recht.
	Zeichen für das Lesen der Anleitung
	UK Conformity Assessed-Symbol zur Erklärung der Konformität im Vereinigten Königreich
	Eindeutige Geräteerkennung
	Medizinisches Gerät
	Bevollmächtigter EU-Vertreter
	Bevollmächtigter Vertreter der Schweiz
	Modellnummer
	Seriennummer
	Min./Max. Lager- und Transporttemperatur
	Min./Max. Lager- und Transportfeuchtigkeit

Reinigung und Dekontaminierung Ihres Geräts

- Reinigen Sie alle Außenflächen mit einem feuchten Tuch oder einem alkoholgetränkten Reinigungstuch.
- Lassen Sie das Gerät trocknen.
- Hartnäckiger Schmutz und Rückstände können mit einer Zahnbürste oder ähnlichem entfernt werden.

Verwenden Sie keine Sprühreinigungsflüssigkeit, kein Gel oder Poliermittel direkt auf Ihrem Gerät und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

Der Montage-Adapter wird von Smartbox Assistive Technology Ltd. hergestellt.

VEREINIGTES KÖNIGREICH: Smartbox Assistive Technology Ltd Ysobel House, Enigma Commercial Centre Sandys Road Malvern WR14 1JJ, England.

EU: REHAVISTA GmbH, Konsul-Smidt-Str. 8c, 28217 Bremen, Deutschland

Modellnummern: 10096-03 / 10096-04

Kompatibel mit:

TP08E	TP10E	TP10H
TS08E	TS10E	TS10H
TP08E - HALTERUNG	TP10E - HALTERUNG	TP10H- HALTERUNG

Hilfe erhalten Sie unter hub.thinksmartbox.com