

Talk Pad


Monteringsbeslag

Monteringsbeslagsættet inkluderer:

- Monteringsbeslag (10096-03 eller 10096-04)
- 3 stk. skruer
- Unbrakonøgle





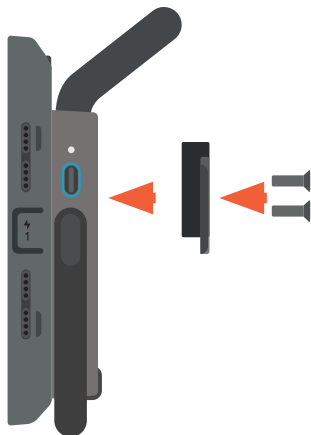




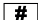

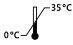
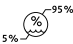
Find de tre skruenhuller til montering bag på enheden.



Påsæt monteringsbeslaget som vist. Stram skruerne med den medfølgende unbrakonøgle.

Når beslaget er godt fastspændt, skal du følge instruktionerne, der fulgte med dit monteringsystem, for at fastgøre enheden.

Symbolforklaring

Symbol	Betydning
	CE-mærkningssymbol, der angiver overensstemmelse med EU's lovgivning.
	Se manualen-symbol
	UK Conformity Assessed symbol til at erklære overensstemmelse i UK
	Unik enhedsidentifikator
	Medicinsk udstyr
	EU-autoriseret repræsentant
	Schweizisk-autoriseret repræsentant
	Modelnummer
	Serienummer
	Min. / Maks. opbevarings- og transporttemperatur
	Min. / Maks. fugt ved opbevaring og transport

Rengøring og dekontaminering af din enhed

- Rengør alle de udvendige overflader med en fugtig klud eller spritserviet.
- Lad enheden tørre.
- Sejt snavs og rester kan fjernes med en tandbørste eller lignende.

Brug ikke sprayrengørevæske, gel eller polermiddel direkte på din enhed, og sænk ikke enheden i vand.

Dette monteringsbeslag er fremstillet af Smartbox Assistive Technology Ltd.

UK: Smartbox Assistive Technology Ltd Ysobel House, Enigma Commercial Centre Sandys Road Malvern WR14 1JJ.

EU: REHAVISTA GmbH, Konsul-Smidt-Str. 8c, 28217 Bremen, Tyskland

Modelnumre: 10096-03 / 10096-04

kompatibel med:

TP08E	TP10E	TP10H
TS08E	TS10E	TS10H
TP08E - CASE	TP10E - CASE	TP10H- CASE

Du kan få support på hub.thinksmartbox.com