


Talk Pad


Tablette de support

L'ensemble Tablette de support comprend :

- Tablette de support (10096-03 ou 10096-04)
- Vis x 3
- Clé à six pans (Allen)

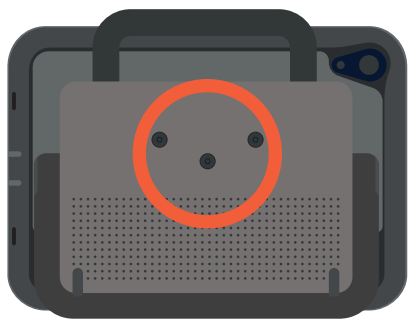



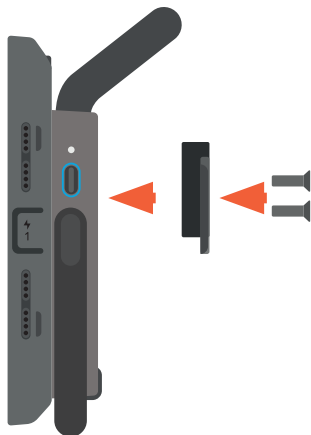






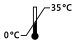
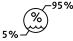
Localisez les trous de montage situés au dos de votre appareil.



Fixez la tablette de support comme indiqué. Serrez les vis à l'aide de la clé à six pans fournie.

Lorsque la tablette est solidement fixée, suivez les consignes de montage de votre système pour attacher votre appareil.

Explication des symboles

Symbole	Signification
	Symbole européen de conformité pour déclarer la conformité à la législation de l'Union européenne
	Symbole vous invitant à lire le guide d'utilisation
	Symbole d'évaluation de la conformité au Royaume-Uni pour déclarer la conformité au Royaume-Uni
	Identifiant unique de l'appareil
	Appareil médical
	Représentant autorisé de l'UE
	Représentant autorisé de la Suisse
	Numéro du modèle
	Numéro de série
	Température de stockage et de transport min./max.
	Humidité de stockage et de transport min./max.

Nettoyage et désinfection de votre appareil

- À l'aide d'un chiffon humide ou d'une lingette imbibée d'alcool, nettoyez toutes les surfaces externes.
- Laissez sécher l'appareil.
- La saleté et les résidus tenaces peuvent être éliminés à l'aide d'une brosse à dents ou d'un objet similaire.

N'utilisez pas de liquide de nettoyage en aérosol, de gel ou de cire directement sur votre appareil, et n'immergez pas l'appareil dans l'eau.

Cette tablette de support est fabriquée par Smartbox Assistive Technology Ltd.

ROYAUME-UNI : Smartbox Assistive Technology Ltd Ysobel House, Enigma Commercial Centre, Sandys Road Malvern, WR14 1JJ, ROYAUME-UNI.

UE : REHAVISTA GmbH, Konsul-Smidt-Str. 8c, 28217 Bremen, Allemagne

Numéros des modèles : 10096-03 / 10096-04

Compatible avec :

TP08E	TP10E	TP10H
TS08E	TS10E	TS10H
TP08E - COQUE	TP10E - COQUE	TP10H - COQUE

Assistance : hub.thinksmartbox.com