


Talk Pad


Piastra di fissaggio

Il kit piastra di fissaggio include:

- Piastra di fissaggio (10096-03 o 10096-04)
- Viti x 3
- Chiave a brugola

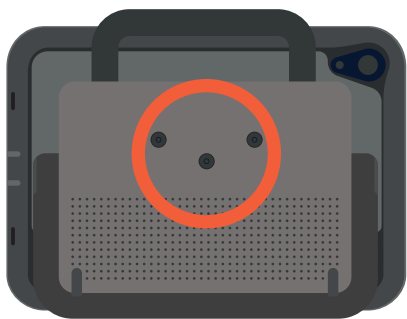

Individuare i fori in cui installare le apposite viti sul retro del dispositivo.

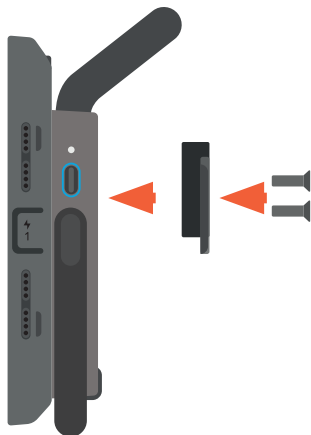

Montare la piastra di fissaggio come mostrato in figura. Serrare le viti utilizzando la chiave a brugola in dotazione.

Quando la piastra sarà stata saldamente installata, seguire le istruzioni incluse nel sistema di montaggio per agganciare il dispositivo.

Descrizione dei simboli

Simbolo	Significato
	Simbolo di Conformità europea per dichiarare la conformità alla normativa EU.
	Simbolo che indica la lettura del manuale
	Simbolo per dichiarare la valutazione di conformità nel Regno Unito
	Identificatore univoco del dispositivo
	Dispositivo medico
	Rappresentante autorizzato dell'UE
	Rappresentante autorizzato per la Svizzera
	Numero modello
	Numero di serie
	Temperatura minima e massima di conservazione e trasporto
	Umidità minima e massima durante la conservazione e il trasporto

Pulizia e decontaminazione del dispositivo

- Utilizzando un panno umido o una salvietta imbevuta di alcool, pulire tutte le superfici esterne.
- Lasciare asciugare il dispositivo.
- Lo sporco ostinato e i residui possono essere rimossi con uno spazzolino da denti o simili.

Non utilizzare liquidi detergenti spray, gel o lucidanti direttamente sul dispositivo né immergerlo in acqua.

Questa piastra di montaggio è prodotta da Smartbox Assistive Technology Ltd.

UK: Smartbox Assistive Technology Ltd Ysobel House, Enigma Commercial Centre Sandys Road Malvern WR14 1JJ.

UE: REHAVISTA GmbH, Konsul-Smidt-Str. 8c, 28217 Bremen, Germania

Numeri del modello: 10096-03 / 10096-04

Compatibile con:

TP08E	TP10E	TP10H
TS08E	TS10E	TS10H
TP08E - CUSTODIA	TP10E - CUSTODIA	TP10H - CUSTODIA

Per assistenza, visita hub.thinksmartbox.com